

SUOJAVISIIRI

cleanside

KERTAKÄYTTÖINEN SUOJAVISIIRI PEHMEÄLLÄ OTSAPANNALLA

KERTAKÄYTTÖINEN VISIIRI


Kevyt ja huurustumaton suojavisiiri suojaa kasvoja ja silmiä roiskeilta ja nesteiltä, ja tarjoaa näin lisäsuojaa tartuntatauteja vastaan. Mukavat, kertakäyttöiset kasvovisiirit on valmistettu polyesteristä, taaten kantajalleen parhaan mahdollisimman näkyvyyden. Myös visiirin pehmustettu otsapanta ja pehmeä elastinen kiinnityspanta lisäävät käyttömukavuutta.

Visiiriä voidaan käyttää myös muiden kasvonsuojien, kuten esimerkiksi suojalasien, silmälasien, tai kasvomaskin kanssa.

Patentoitu, CE-merkitty, Englannissa valmistettu visiiri täyttää EU 166:2001 -vaatimukset.

TUOTETIEDOT

- ✦ Huurustumaton*
- ✦ Takaa parhaan mahdollisen näkyvyyden
- ✦ Pehmustettu otsapanta, joka ei paina
- ✦ Pehmeä kiinnityspanta
- ✦ Erittäin kevyt
- ✦ Suojaa kasvoja ja silmiä roiskeilta ja tartuntataudeilta
- ✦ Voidaan käyttää silmälasien ja kasvomaskin kanssa
- ✦ CE-merkitty, EN 166:2001 luokka II sertifioitu (EU) 2016/425

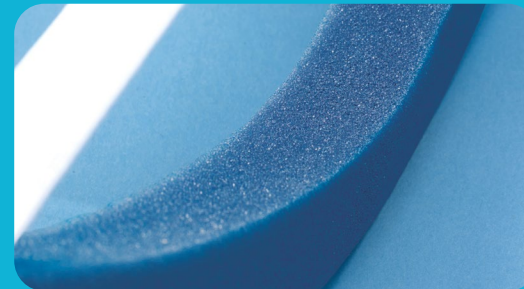

LISÄTIEDOT

Ominaisuus	Tiedot
VÄRI	LÄPINÄKYVÄ (EI SÄVYTETTY)
TUOTETYYPPI	SUOJAVISIIRI
KOKO	330 MM X 220 MM
OPTINEN LUOKKA	1 (+/-0.06)
KÄYTTÖALA	PISARAT JA ROISKEET
KÄYTTÖ	TERVEYDENHUOLTO, SUOJAVAALETUS (EI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN)
STANDARDIT	EN166:2001 LUOKKA II cl 6.1-6.3, 7.1.1, 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.7, 7.2.4
SÄILYVYYS	5 VUOTTA OIKEAOPPISESTI SÄILYTETTYNÄ
SÄILYTYS	SÄILYTETÄÄN ALKUPERÄISPAKKAUKSESSA, SUOJATTUNA AURINGONVALOLTA, 23°C:SSA, 50 % SUHTEELLISESSA ILMANKOSTEUEDESSA

MATERIAALIT

Materiaali	Kuvaus	Koko
VISIIRIN LIPPA	OPTINEN LUOKKA PET	0.16 - 0.18 MM PAKSUUS
PANNAN VAAHTOMUOVIPEHMUSTE	VAAHTOMUOVIN PEHMYYYS	25 MM PAKSUUS
ELASTINEN PANTA	LÄÄKINNÄLLISTÄ LAATUA, LATEKSIVAPAA	19MM WIDE

KÄYTTÖOHJEET

Poista suojakalvo varovasti visiirin takaosasta ennen käyttöä. Varmista tuotetta pukiessa ja riisuttaessa, että elastinen panta on tiukasti pään ympärillä, ja vaahtomuovipehmuste on otsaa vasten. Käytä vain sopivan kokoisia tuotteita, jotka on säädetty oikein. Liian suuri visiiri ei välttämättä pysy paikoillaan, ja liian tiukka on epämukava käyttää. Tätä tuotetta on saatavana yhtenä vakiokokona joustavalla elastisella pannalla.

Lisätiedot

Lateksiton / Materiaalit lääkinällistä laatua / Kertakäyttöinen, puhdistus ei suositeltavaa / Voidaan käyttää pitkiäkin aikoja, ei aiheuta huimausta tai väsymystä / Voidaan käyttää silmalasien tai kasvomaskin kanssa / Tarkista tuote aina ennen käyttöönottoa / Valmistettu Englannissa, valmistaja: Tecman

DOC252, ISSUE 6, NOV 23

