


Käyttöohje

Easyloo alusastia WC-tuoleihin (REF: 10015)

Ennen käyttöä

1. Aseta Easyloo WC-tuoliin / portatiiviin
2. Irrota siniset kiinnitysteipit neljältä sivulta yksi kerrallaan ja kiinnitä Easyloo tukevasti WC-tuoliin
3. Varmista, että imeytyslevy on Easyloon sisällä

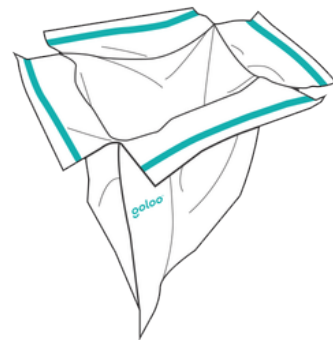

Käytön jälkeen

4. Irrota Easyloo wc-tuolista ja painele teippipinnat vastakkain
5. Sulje Easyloo vetämällä sinistä sulkijanaruista pussi kiinni ja solmi se kiinni
6. Easyloo on valmis hävitettäväksi polttojätteenä (erite)

